

所有者・管理者の方へ

クマリフト株式会社

いす式階段昇降機「自由生活」ご使用時の注意について

平素より、弊社製品をご愛顧いただきありがとうございます。

さて、現在お使いいただいております「いす式階段昇降機 自由生活（全機種）」のご使用時の注意について、改めてご連絡させていただきます。

お客様の安全を確保するために、必ずお守りいただきますようお願い申し上げます。

**1. いす式階段昇降機「自由生活」に乗られるときは、必ず安全ベルトを締めてください。**

安全ベルトを着用しないと、ベルトや衣服の挟み込みなどで予期しない急な運転停止などが起こった時や、体調が悪くなった時に体のバランスを失い、いすからすべり落ちるなどしてケガの原因となります。

必ず安全ベルトを着用してご使用ください。

**2. 安全ベルトの巻き込みに注意してください。**

安全ベルトが自動で巻き取るタイプの場合、金具を外すと自動的にベルトが巻き取られま  
すので、手や衣服などを巻き込まれないように注意してください。

金具を外した後は巻き取られていることを確認してください。

安全ベルトが自動で巻き取らないタイプの場合、ご使用後は安全ベルトの金具を差し込んで、いすの上に収納するなど、いすの下に垂れ下がったままにしないようにしてください。

※安全ベルトが完全に巻き取られていない場合や垂れ下がっている場合、安全ベルトを着用しないで使用すると次のような故障が起きるおそれがありますので注意してください。

①昇降中に駆動部のローラーとレールの間にベルトが巻き込まれ運転停止となる。

②ベルトが座面に垂れ下がった状態でその上に座り、ベルトに折り目やしわがつくことでうまく巻き取れなくなる。

**3. 取扱説明書をよくお読みください。**

お客様へお渡ししています、取扱説明書の「1.安全にお使いいただくために」に記載していますが、「警告」「注意」の各項目についても必ず守ってご使用をお願いいたします。

以上